



# MEMOday

Gebrauchsanweisung

Art. nr: 508270

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>3</b>
Über MEMOday .....	3
Zweckbestimmung .....	3
Über dieses Dokument .....	3
<b>Übersicht über MEMOday</b> .....	<b>3</b>
Im Lieferumfang enthaltene Teile .....	3
Enthaltene Dokumente .....	3
<b>Erste Schritte mit MEMOday</b> .....	<b>4</b>
Platzieren Sie MEMOday in den Haushalt .....	4
Inbetriebnehmen des MEMOday .....	4
Stellen Sie MEMOday ein .....	4
<b>Verwenden Sie MEMOday</b> .....	<b>4</b>
Zeitintervalle .....	5
<b>Personalisieren Sie den MEMOday</b> .....	<b>5</b>
Gehen Sie zum Ein/Aus-Menü .....	5
Ändern Sie die Einstellungen .....	5
<b>Wartung</b> .....	<b>6</b>
<b>Lagerung und Entsorgung</b> .....	<b>6</b>
<b>Wichtige Informationen</b> .....	<b>7</b>
<b>Produktdaten</b> .....	<b>7</b>

# Einleitung

## Über MEMOday

MEMOday erinnert Sie daran, welcher Tag und welche Zeit es ist. Das Display zeigt Zeit, Wochentag, Datum und Tageszeit an. Die Daten können auch vorgelesen werden. Durch die Tag- und Nachtanzeige kann MEMOday verhindern, dass der Anwender mitten in der Nacht aus Versehen einen Verwandten anruft. MEMOday sollte zentral im Haushalt platziert werden. MEMOday lässt sich einfach an die Bedürfnisse des Anwenders anpassen.


## Zweckbestimmung

MEMOday ist eine Kalenderuhr, die Personen mit Schwierigkeiten bei Zeitorientierung und Gedächtnis unterstützen soll. MEMOday ist für die Verwendung im Innenbereich in Wohnumgebungen vorgesehen.

## Über dieses Dokument

Diese Gebrauchsanweisung richtet sich an Support-Mitarbeiter. In diesem Dokument lernen Sie, wie Sie das MEMOday sicher einrichten und bestimmte Einstellungen an den Anwender anpassen.

## Übersicht über MEMOday

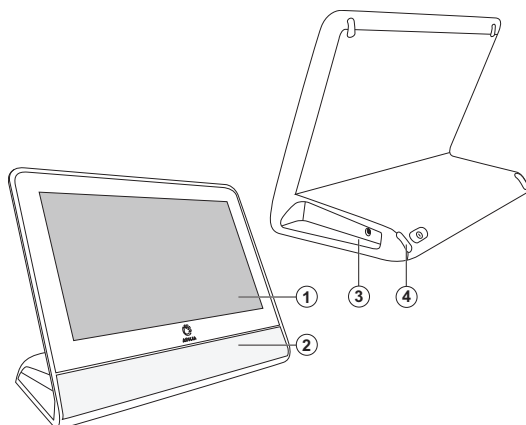

1. Touch-Screen
2. Lautsprecher
3. Stromanschluss
4. Ein-/Aus-Taste

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

- MEMOday
- Netzadapter


### Enthaltene Dokumente

- Gebrauchsanweisung (dieses Dokument)

# Erste Schritte mit MEMOday

## Platzieren Sie MEMOday in den Haushalt


Bestimmen Sie, wo MEMOday im Haushalt platziert werden soll. Es sollte an einem Ort stehen, wo es gut sichtbar ist, zum Beispiel auf der Küchentheke. Achten Sie darauf, dass Lichtreflexionen von Lampen oder Sonnenlicht die Sichtbarkeit des Displays nicht beeinträchtigen.

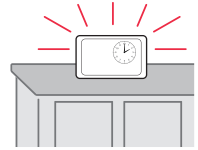

## Inbetriebnehmen des MEMOday

**⚠️ WARNUNG:** Verwenden Sie nur den mit dem MEMOday mitgelieferten Netzadapter.

Verbinden Sie den Stecker mit dem MEMOday (siehe bild) und schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

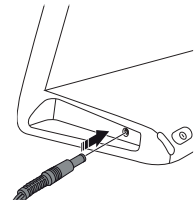


## Stellen Sie MEMOday ein

Wenn MEMOday zum ersten Mal gestartet wird, wird eine Anleitung zum Einstellen der gewünschten Sprache, des Datums und der Uhrzeit angezeigt. Wenn Sie möchten, können Sie auch festlegen, welche Informationen auf dem Display angezeigt werden sollen. Dies kann jedoch auch später erfolgen.

Weitere Informationen finden Sie unter *Ändern Sie die Einstellungen* auf Seite 5.

## Verwenden Sie MEMOday

- Datum und Zeit werden auf dem Display angezeigt.
- Tippen Sie auf das Display, um die angezeigten Informationen zu hören. Dies ist nur verfügbar, wenn für die ausgewählte Sprache eine Sprachausgabe möglich ist und die Sprachausgabe aktiviert wurde.
- Tippen Sie auf , um die Hintergrundfarbe von hell auf dunkel oder dunkel auf hell zu ändern. Dies ist nur verfügbar, wenn die Einstellung Farbe ändern aktiviert ist.

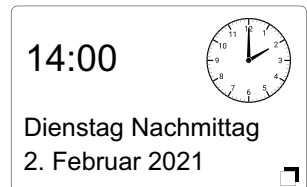

## Zeitintervalle

MEMOday zeigt die Tageszeit mit Text an. Während der Nachtstunden wird die Display-Helligkeit automatisch reduziert.


Die Zeitintervalle für diese Anzeige sind wie folgt vorprogrammiert:

- Früher Morgen: 06:00–09:00
- Vormittag: 09:00–12:00
- Nachmittag: 12:00–18:00
- Abend: 18:00–23:00
- Nacht: 23:00–06:00

## Personalisieren Sie den MEMOday

### Gehen Sie zum Ein/Aus-Menü

Über das Ein/Aus-Menü gehen Sie zu Einstellungen und dem Menüpunkt MEMOday ausschalten.

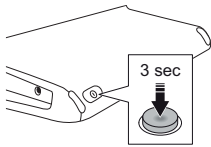


1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.







2. Das Ein/Aus-Menü wird geöffnet.

### Ändern Sie die Einstellungen

Um die Einstellungen von MEMOday zu ändern, gehen Sie zum Ein/Aus-Menü und tippen Sie auf .

#### Sprache einstellen

- Sprachen, die mit  gekennzeichnet sein, haben Sprachausgabe.
- Tippen Sie auf  um die Sprachausgabe zu aktivieren oder deaktivieren.
  -  bedeutet Sprachausgabe ist aktiviert.
  -  bedeutet Sprachausgabe ist deaktiviert.

## Sprachausgabe

**HINWEIS:** Dies ist nur für Sprachen mit Sprachausgabe verfügbar.

- Stellen Sie Lautstärke und Sprechtempo für die Sprachausgabe ein.
- Wählen Sie, ob MEMOday alles oder nur das gewählte Element vorliest.

## Land wählen

Wählen Sie das Land aus, in dem MEMOday verwendet wird. Dies bestimmt den Übergang zur Sommerzeit.

## Zeit und Datum einstellen

Stellen Sie die Zeit, Jahr, Monat und Tag ein.

## Anzeigeinfo einstellen

Wählen Sie aus, welche Informationen auf dem Display angezeigt werden.


**TIPP:** Wenn weniger Informationen angezeigt werden, wird MEMOday noch leichter verständlich.

## Wartung

**⚠ WARNUNG:** MEMOday darf nicht in Wasser eingetaucht werden.

Reinigen Sie MEMOday mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel.

## Lagerung und Entsorgung

Lagern Sie das Produkt in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur. Schalten Sie MEMOday vor der Lagerung vollständig aus: Gehen Sie zum Ein/Aus-Menü und tippen Sie auf . Wenn die Batterie leer ist, werden die Zeiteinstellungen von MEMOday zurückgesetzt und müssen erneut vorgenommen werden.



Das Produkt enthält elektrische Komponenten, die dem Recycling zugeführt werden müssen. Eine fachgerechte Entsorgung ist zu gewährleisten.

# Wichtige Informationen

Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und verstehen.

## Sicherheitshinweise vor Gebrauch von MEMOday

**!** **WARNUNG:** Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Verwenden Sie nur den mit dem MEMOday mitgelieferten Netzadapter.
- MEMOday darf nicht in Wasser eingetaucht werden.

## Schwere Vorfälle

Sollte im Zusammenhang mit dem Produkt ein schwerwiegendes Vorkommnis auftreten, muss dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden. Ein Vorfall gilt als schwerwiegend, wenn er direkt oder indirekt geführt hat, geführt haben könnte oder hätte führen können zu Tod eines Anwenders oder einer anderen Person, vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Anwenders oder einer anderen Person oder eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

## Konformität mit den Anforderungen für Medizinprodukte

MEMOday wird als technische Hilfe für Personen mit Behinderungen vermarktet und erfüllt alle notwendigen Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien für Medizinprodukte.

## Produkthaftung

Das Produkt wurde gemäß ISO 14971 entwickelt und auf Risiken bewertet. Die Gebrauchsanweisung und die technischen Spezifikationen wurden gemäß den Sicherheitsbewertungen in der Risikoanalyse erstellt. Berücksichtigen Sie immer die Sicherheit, wenn Sie das Produkt verwenden. Abilia AB kann nicht für Folgen einer unsachgemäßen Verwendung oder Installation des Produkts verantwortlich gemacht werden. Jegliche Beschädigung oder jeder Missbrauch des Produkts führt zum Erlöschen der Garantie und zur Befreiung des Herstellers von der Haftung. Die geschätzte Lebensdauer des Produkts ist gültig, wenn es gemäß den Verwendungszweck- und Wartungsanweisungen verwendet wird.

## Produktdaten

Abmessungen H x B x T:	140 x 185 x 95 mm
Gewicht:	0.35 kg
Batterie:	Integriert, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V
Stromversorgung:	5.0 V, 2000 mA (Zentrum positiv).
Display:	7 "
Geschätzte Lebensdauer:	5 Jahre

